

Gebrauchsanweisung

Sitzschale

Physio Punkt

HMV: 26.11.01.1xxx

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!

Wir möchten Ihnen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und den Kauf unseres
Produktes danken.

Die Sitzschale Physio Punkt zeichnet
sich durch seine Qualität, Sicherheit und
einfache Bedienung aus.

Damit Sie dieses Hilfsmittel optimal
nutzen können, bitten wir Sie und
evtl. andere Nutzer oder Betreuer
diese Gebrauchsanweisung sorgfältig
durchzulesen.



**Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem
ersten Gebrauch sorgfältig durch und
nutzen Sie das Produkt sachgemäß!**

2 Inhaltsverzeichnis

Thema	Seite
1 Vorwort	3
2 Inhaltsverzeichnis	4
3 Sicherheitshinweise	5
4 Gewährleistung und Produkthaftung	9
5 CE-Label und Position	9
6 Indikationen und Prophylaxen	10
7 Verwendungszweck	11
8 Produktübersicht	12
8.1 Grundmodell	12
8.2 Zubehör / Optionen	13
9 Inbetriebnahme	14
10 Montage und Einstellungen	15
10.1 Grundmodell	15
10.2 Zubehör / Optionen	16
11 Typen und Zubehör	22
11.1 Grundmodell	22
11.2 Zubehör / Optionen	22
12 Technische Daten	24
13 Reinigung und Desinfektion	25
14 Wartung und Instandsetzung	26
15 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz	28
16 Störungen, Reparatur, Ersatzteile	29
17 Aufbewahrung	30

3 Sicherheitshinweise

Die Sitzschale Physio Punkt ist mit dem CE-Zeichen versehen und wurde nach neuesten Erkenntnissen entwickelt. Die Herstellung unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Sitzschale in Betrieb nehmen.

Die Gebrauchsanweisung ist ein integraler Bestandteil des Hilfsmittels. Im Falle eines Verlustes fordern Sie eine Kopie an oder laden sie sich diese aus dem Downloadbereich unserer Homepage www.ato-form.com herunter. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig an einem Ort auf, an dem das Pflege- und Wartungspersonal Zugang hat.

Die Gebrauchsanweisung ersetzt nicht vollständig die Erfahrungen des

Pflegepersonals oder Anwenders, die sie z. B. durch die Teilnahme an Schulungen erworben haben. Im Falle von spezifischen und schwierigen Einsätzen repräsentiert diese Gebrauchsanweisung lediglich eine Anleitung der wichtigsten Handhabungen.

Vergewissern Sie sich, dass alle Nutzer oder Betreuer die Nutzung des Hilfsmittels und die Bedeutung der Symbole die am Produkt angebracht sind, verstanden haben.

Unfälle können verhindert werden, indem Sie die technischen Hinweise gemäß den entsprechenden EWG Richtlinien befolgen.

Schutzvorrichtungen, Etiketten und Warnhinweise dürfen nicht entfernt werden.

Der Physio Punkt ist je nach Größe von 60 bis 80 kg belastbar.

 **Eine regelmäßige Kontrolle durch Ihrem Fachhändler (mindestens 1x pro Jahr) verlängert die Lebensdauer der Sitzschale und gibt Ihnen Sicherheit. Siehe hierzu auch Wartung und Instandsetzung.**

3 Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Montage bzw. dem Gebrauch der Sitzschale Physio Punkt die Hinweise der vorliegenden Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, da diese für Ihre Sicherheit und als Leitfaden für den korrekten Gebrauch und die korrekte Wartung des Produktes verfasst wurde. Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil der Lieferung und sollte für spätere Zugriffe sorgfältig aufbewahrt werden.
- Die Gebrauchsanweisung richtet sich an die Händler und Nutzer (bzw. deren mögliche Betreuer) der Sitzschale Physio Punkt. Sie enthält Angaben über den korrekten Einsatz des Produktes, kann aber die nötige Erfahrung des Nutzers bzw. der Betreuer im Umgang mit dem Hilfsmittel nicht ersetzen.
- Ihr Händler ist angehalten, Ihnen das Produkt betriebsbereit zu übergeben, Ihnen die Funktionen und technischen Daten des Hilfsmittels genauestens zu erklären, sowie Ihnen die nötige Hilfestellung und Einweisung für einen richtigen und effizienten Einsatz zukommen zu lassen.
- Die Angaben der Gebrauchsanweisung beziehen sich auf den Zeitpunkt, in welchem das Produkt in den Handel gebracht wurde. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle sich als notwendig erweisenden Änderungen am Hilfsmittel selbst und in der zugehörigen Gebrauchsanweisung vorzunehmen, ohne dazu verpflichtet zu sein, die jeweils vorhergehenden Hilfsmittel und entsprechenden Gebrauchsanweisungen ändern zu müssen.
- Der Einsatz des Hilfsmittels und seiner Zusatzprodukte muss unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.
- Die Sitzschale Physio Punkt darf nicht ohne die ständige Anwesenheit einer qualifizierten Person bzw. Familienmitglieds des Nutzers zum Einsatz kommen.
- Lassen Sie den Nutzer niemals mit dem Hilfsmittel allein.
- Der Physio Punkt darf nur von Personen benutzt werden, die sich mit den Normen und Vorschriften der vorliegenden Gebrauchsanweisung vertraut gemacht haben.
- Der Physio Punkt darf nur von Personen mit geeigneter Statur und körperlicher Eignung benutzt werden.
- Platzieren Sie nie einen Nutzer in einem Hilfsmittel, welches nicht auf seine Körpergröße oder sein Gewicht abgestimmt ist.
- Nehmen Sie Einstellungen nur in unbelastetem Zustand vor.
- Auf dem von ihnen erworbenen Produkt dürfen keine zu heißen Behälter oder Objekte abgestellt werden, da hierdurch das Hilfsmittel beschädigt werden kann.
- Belasten Sie das Hilfsmittel nicht mit schweren Gegenständen, weil dadurch die Struktur, der Schwerpunkt und somit das Gleichgewicht beeinträchtigt wird.

- Überzeugen Sie sich stets davon, dass sich im Einsatzbereich des Hilfsmittels keine Hindernisse, wie z.B. Teppiche, Treppen oder auf dem Boden liegende Objekte befinden, die zum Umkippen der Sitzschale Physio Punkt führen könnten.
- Räumen Sie alle Gegenstände und Objekte aus dem Weg, welche beim Einsatz des Hilfsmittels evtl. angestoßen werden und herabfallen können.
- Setzen Sie das Hilfsmittel niemals auf unwegsamem Gelände, stark geneigten Flächen oder Treppen ein.
- Bewegen Sie den Physio Punkt nicht fort, wenn ein Nutzer im Hilfsmittel steht.
- Verwenden Sie das RehaHilfsmittel nicht, ohne sich zuvor von der vollständigen und korrekten Anbringung der Sicherheitsgurte – falls vorhanden – überzeugt zu haben.
- Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz des Hilfsmittels, dass alle regulierbaren Teile stets festgestellt sind.
- Die Bremsen sind beim Abstellen des Gerätes bzw. bei Nichtbenutzung festzustellen.
- Betätigen Sie beim Anhalten, wenn für einen gesicherten Stand notwendig, die Feststellbremsen.
- Die Bremsen sind immer bei Inbetriebnahme oder vor dem Ein- bzw. Verstellen von Funktionen oder Zubehör zu betätigen.
- Beachten Sie bei der gleichzeitigen Verwendung mehrerer RehaHilfsmittel die sicherheitsrelevanten Informationen der einzelnen Hilfsmittel als auch die der Gesamteinheit.
- Alle Aspekte der räumlichen Einflüsse (unebene, nasse oder glatte Böden, Stufen oder ähnliches) müssen dem Betreuer bzw. Nutzer bekannt sein und berücksichtigt werden.
- Verwenden Sie den Physio Punkt nicht, ohne vorher die Räder des Hilfsmittels zu prüfen.
- Bei nassen bzw. verschmutzten Rädern kann sich die Bremswirkung verringern.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben, Griffe etc. fest angezogen sind. Abgenutzte oder defekte Teile müssen sofort repariert oder ersetzt werden. Dies ist besonders für den gefahrlosen Einsatz des Hilfsmittels wichtig! Prüfen Sie sorgfältig Spannvorrichtungen und dergleichen auf festen Halt.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind oder gar fehlen. Diese dürfen nur mit Originalteilen ersetzt werden.
- Führen Sie keinerlei Eingriffe oder Maßnahmen durch, wenn Sie sich nicht ganz sicher über deren Auswirkungen sind. Wenden Sie sich zu Ihrer Sicherheit an den nächsten technischen Service oder auch direkt an den Hersteller.
- Bei Unfällen oder Funktionsstörungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Hersteller, von dem Sie das Hilfsmittel bezogen haben.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden an Personen, Objekten oder Tieren, die auf Grund ungeeigneten oder falschen Einsatzes des Hilfsmittels durch den Nutzer oder Dritte, durch falsche Montage von Teilen und Zubehör, durch Nachlässigkeit in

der Wartung, durch nicht genehmigte Eingriffe oder Änderungen, durch den Einsatz nicht originaler Ersatzteile oder Zubehör, durch nicht vorhersehbare außergewöhnliche Ereignisse oder durch Nichtbeachtung der Vorschriften in der vorliegenden Gebrauchsanweisung eingetreten sind.

- Reinigen Sie die Sitzschale Physio Punkt gemäß der Vorschriften im Kapitel „Reinigung“.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt vor dem Einsatz mit dem Nutzer gemäß den Reinigungsvorschriften gereinigt und wenn indiziert desinfiziert wird.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller (ATO FORM GmbH) und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Wir entwickeln ständig neue Hilfsmittel und verbessern die bestehenden Produkte. Anregungen jeder Art nehmen wir gerne entgegen.

4 Gewährleistung und Produkthaftung

Für neue Produkte der ATO FORM GmbH hat der private Nutzer, wie im Rahmen des Verbraucherschutzgesetzes geregelt, Anspruch auf die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren ab Anschaffung. Bitte bewahren Sie die Unterlagen für die Anschaffung sorgfältig auf.

Haben Sie das Produkt außerhalb Deutschlands erworben, gelten die am Ort jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile und Zubehör verwendet werden. Bei Nichtbeachtung bzw. Reparaturen oder Änderungen an dem Physio Punkt oder dessen Bestandteilen durch nicht autorisierte Personen, erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Die Herstellerverpflichtungen gehen dann auf denjenigen über, der die Abänderungen vornimmt.

Jede Produkthaftung seitens des Herstellers oder dessen Vertreters wird in diesen Fällen im voraus ausgeschlossen.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien und periodische Instandhaltung, sowie Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte, zurückzuführen sind.

Durch eine Reparatur oder Ersatzlieferung im Rahmen des Gewährleistungsanspruchs wird die Gewährleistungsfrist, mit Ausnahme der ausgetauschten Teile, nicht verlängert.

Anerkennung von Gewährleistung schließt jede Anfrage für vorübergehenden Ersatz mit ähnlicher Ausstattung aus, mit der Ausnahme einer vorherigen Vereinbarung zwischen beiden Parteien.

5 CE-Label und Position

Das CE-Label mit Angabe des Herstellers, Artikelnummer, Seriennummer und Herstellungsdatum befindet sich auf der Rückenlehne unten links.



6 Indikationen und Prophylaxen

Zu den Indikationen gehören folgende:

- Epilepsie
- Infantile Zerebralparese und weitere Paresen
- Querschnittslähmung
- Dyskinese
- Alle Formen von neuro-muskuläre Erkrankungen
- Alle Formen von dystrophen und atrophen Muskulaturveränderungen
- Alle Formen von Fehlbildungen und Deformitäten
- Motorische Beeinträchtigungen
- Postoperative Behandlung
- Allgemeine verzögerte Entwicklung
...und vieles mehr

Als Kontraindikation sind hier folgende zu erwähnen:

- Kinder mit gravierender Tonus-Dysregulation
- Kinder mit Unverträglichkeiten auf verarbeitete Materialien

! Die Liste der Kontraindikationen gibt keine Garantie auf Vollständigkeit. Der Allgemeinzustand des Patienten ist ein wichtiger Bestandteil der Risikobewertung. Im individuellen Fall liegt die Entscheidung beim behandelnden Arzt. Dieser wägt die Risiken gegen die zu erwartenden Vorteile ab.

7 Verwendungszweck

Das Hilfsmittel kann wie folgt eingesetzt werden:

- Ausgleich von Fehlstellungen und Fehlhaltungen
- Unterstützung der Sitzstabilität
- Ausgleich einer Funktionsstörung des Bewegungsapparates
- Einsatz in Rehabilitationsmaßnahmen
- Ausrichtung der Sitzhaltung für das Interagieren mit der Gesellschaft und der Teilhabe an der Umwelt
- Prophylaxe bei Dekubitus
- Unterstützung der Vitalfunktionen
- Ermöglicht die Mobilität des Anwenders
- Unterstützend im häuslichen und pflegerischen Bereich
- Einsetzbar im Haus oder auf der Straße
- Stimuliert Stoffwechsels, das vegetative Nervensystem und Herz-Kreislauf-System
- Kräftigung und Aufbau des gesamten Skeletts

Das Hilfsmittel muss durch einen Arzt verschrieben werden, der zuvor geprüft und festgestellt hat, ob der Physio Punkt zur Erreichung der individuellen Therapieziele des Nutzers geeignet ist. Zudem hat der Arzt die Eignung des Hilfsmittels bezüglich Maße, Gewicht sowie Annahme des Hilfsmittels durch den Nutzer festgestellt.

Die Auslieferung des Produkts erfolgt über einen hierfür autorisierten Händler gemäß den Vorschriften des Einsatzlandes und unter strenger Einhaltung der Angaben und Hinweise der Gebrauchsanweisung für die Einstellung des Hilfsmittels ausgehend von den Maßen des Nutzers. Nur die Einhaltung der Vorschriften und Hinweise können zu positiven ergonomischen Effekten führen.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Einsatz der Sitzschale Physio Punkt.

8 Produktübersicht



8.1 Grundmodell

1. Sitzschale mit Rückenverstellung
2. Kopfstützenbeschlag
3. Armlehnenbeschlag
4. Aufnahme für Untergestell (Zubehör)
5. Armlehnen (Zubehör)
6. Kopfstütze (Zubehör)
7. Polsterauflagen inkl. Bezüge (Zubehör)



8.2 Zubehör / Optionen

1. Kopfstützen: groß, klein, lateral
2. Bezug: rot oder blau
3. Therapietisch
4. Parallelogrammfußschale (nur in Verbindung einem Untergestell)
5. Abduktionskeil
6. Armlehnen (Paar)
7. Fixationsweste (verschiedene Farben)
8. Sitzhose (verschiedene Farben)
9. Brustgurt
10. H-Gurt
11. Schulterbügel
12. Polstereinsatz (ohne Abb.)
13. Rückenverlängerung (ohne Abb.)
nur in Verbindung mit einer Kopf-
stütze

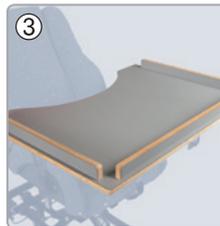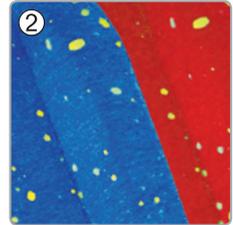

Die vollständige Übersicht über unser umfangreiches Angebot an Zubehör für den Physio Punkt finden Sie unter dem Punkt **11.2 Typen und Zubehör** auf Seite 20/21.



9 Inbetriebnahme

Der Händler ist gehalten, das Hilfsmittel auszupacken, sicher zu stellen, dass die im Lieferumfang aufgeführten Bau- bzw. Zubehörteile vollständig vorhanden und unbeschädigt sind sowie dem Käufer die ersten Einweisungen für den Gebrauch zukommen zu lassen. Vor allem muss der Händler die gesamte vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen, um sie dem Kunden in allen Einzelheiten erklären zu können.

Auf diese Weise, d. h. mit Hilfe des Händlers, müssen sich sowohl der Nutzer als auch seine Betreuer mit der richtigen Einstellung des Hilfsmittels vertraut machen.

Ist die Vorführung beendet, muss sich der Händler davon überzeugen, dass der Nutzer und/oder die Betreuer die Grundlagenfunktionen des Hilfsmittels verstanden haben. Nur so können Gefahrensituationen für den Nutzer vermieden werden.

Diese oben genannten Voraussetzungen sind sowohl beim Erst- als auch beim Wiedereinsatz zu beachten.

Bei der Benutzung des Hilfsmittels durch Fachpersonal ist eine Einweisung in den Gebrauch sowie die Grundfunktionen des Produktes gemäß MPG durch den Verkäufer unabdingbar.

10 Montage und Einstellungen

10.1 Grundmodell

Vorbereitung

Packen Sie das Produkt aus und entfernen Sie alle Verpackungsteile.

Das Hilfsmittel ist komplett montiert.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist.



Abb. 1

Neigung der Rückenlehne

Die Rückenlehnung kann im Bereich von -5 Grad bis – je nach Modellgröße – zwischen 25 und 36 Grad eingestellt werden. Lösen Sie den Klemmhebel auf der Rückseite der Rückenlehne im unteren Bereich (Abb. 1).

Jetzt können Sie die Rückenlehne mit leichter Führung an der oberen Kante einstellen.

Sichern Sie die Neigung der Rückenlehne, indem Sie den Klemmhebel wieder fest sichern.

Die Neigung der Rückenlehne kann auch mit dem Nutzer im Sitz verstellt werden. Beachten Sie dabei unbedingt die Größe und das Gewicht des Nutzers.

Gegebenenfalls stützen sie den Nutzer entsprechen ab.

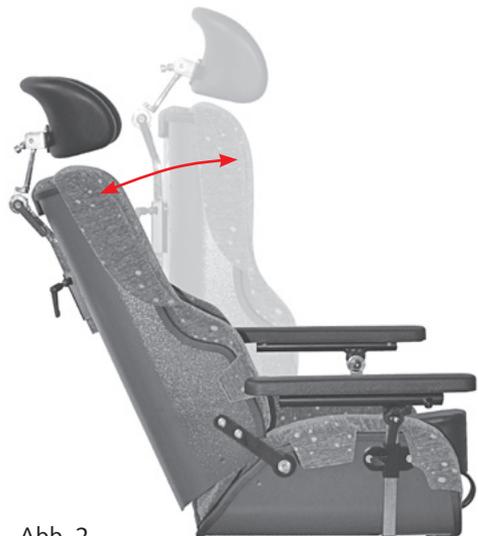


Abb. 2

10.2 Zubehör / Optionen

Einstellung Höhe der Armlehnen

Zur Einstellung der Höhe der Armauflagen lösen Sie den Sterngriff (Abb. 3 – Pos. ①). Achten Sie darauf, dass die Armauflagen auf beiden Seiten in gleicher Höhe eingestellt werden und die Sterngriffe wieder fest angezogen werden.

Einstellung der Neigung der Armlehnen

Die Armauflagen lassen sich um +/- 15 Grad in der Neigung verstellen. Zur Einstellung der Neigung der Armauflagen lösen Sie die Klemmhebel (Abb. 3 – Pos. ②).

Achten Sie darauf, dass Sie den Klemmhebel nach dem Einstellen der Neigung wieder fest sichern.

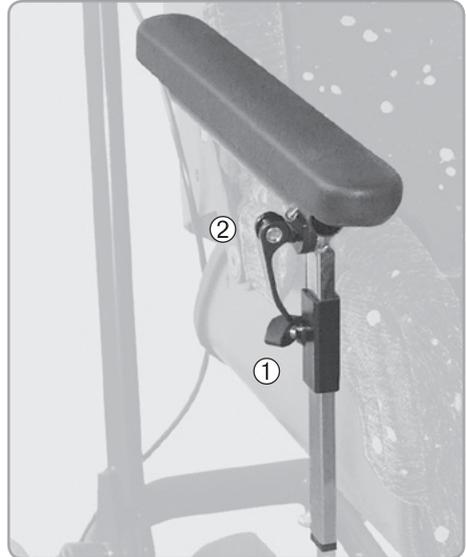


Abb. 3

Polster und Bezug

Das Polster wird mit dem Bezug mit Klettverschlüssen an der Sitzschale gesichert oder der Bezug über die Ränder (Rückenkante oben) gezogen.

Die Polsterbezüge können vom Polster abgezogen und separat gemäß den Reinigungsvorschriften gewaschen werden.

Montage und Einstellung der Höhe der Kopfstütze

Die Aufnahme für die Kopfstütze befindet sich auf der Rückseite der Rückenlehne im oberen Bereich. (Abb. 4)

Hier können Sie auch die Höhe der Kopfstütze anpassen.

Achten Sie darauf, dass der Klemmhebel nach dem Einsetzen der Kopfstütze gut gesichert ist.



Abb. 4

Einstellung der Tiefe der Kopfstütze

Die Kopfstütze kann in der Neigung und in der Tiefe an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.

Lösen Sie hierzu den Klemmhebel (Abb. 5 – Pos. ①) und stellen Sie die Tiefe und die Neigung ein. Mit der Inbusschraube können Sie die der Neigung der Kopfstütze einstellen.

Gegebenenfalls muss die Höhe der Kopfstütze nachjustiert werden.

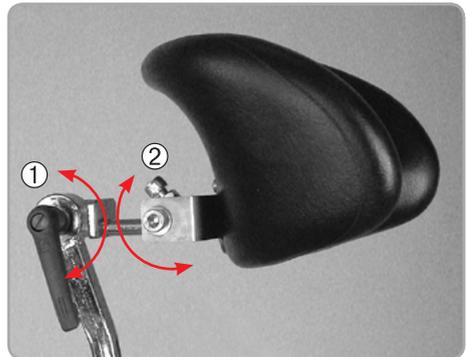


Abb. 5

Achtung!

Achten Sie darauf, dass ALLE Schrauben und Klemmhebel nach der Einstellung der Kopfstütze fest angezogen bzw. gesichert sind.

Aufnahme für Untergestell

Die Sitzschale Physio Punkt ist kompatibel einsetzbar mit verschiedenen Untergestellen.

Die Schale wird mit dem Adapter auf das Untergestell geschoben, bis der Federstift auf der Unterseite der Sitzschale hörbar einrastet.

! **Kontrollieren Sie den Sitz der Sitzschale auf dem Adapter. Achten Sie bei der Montage auf dem Untergestell immer darauf, dass die Sitzschale auf der Unterseite gut gesichert ist.**



Abb. 6



Montage des Abduktionskeils Einstellung der Tiefe

Die Aufnahme für den Abduktionskeil befindet sich unterhalb der Sitzfläche im vorderen Bereich.

Setzen Sie den Abduktionskeil mit der gewünschten Tiefe in die Aufnahme und sichern Sie den Abduktionskeil mit dem Klemmhebel.

! **Achten Sie darauf, dass der Abduktionskeil sicher sitzt und der Griff des Klemmhebels wie in der Abbildung nach dem Sichern nach hinten gedreht wird.**

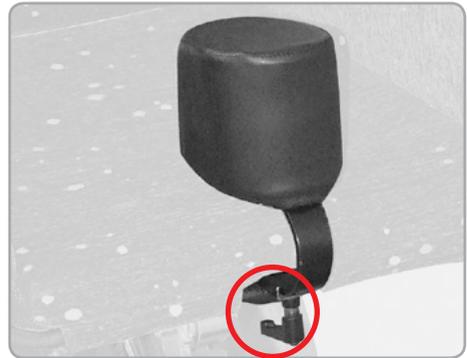


Abb. 7

Montage und Einstellung der Fixationsweste und der Sitzhose

Auf der Rückseite der Sitzschale befinden sich Klappschnallen, mit denen Sie die Fixierweste sichern und einstellen können.

Fädeln Sie hierzu die Sicherungsgurte durch die Schlitze in der entsprechenden Höhe.

Achten Sie darauf, dass die Klappschnallen bei der Sicherung des Nutzers mit einer Fixierweste gut geschlossen sind.

Die Sitzhose wird äquivalent der Fixationsweste unterhalb der Sitzfläche gesichert.



Abb. 8

Montage der Rückenverlängerung

Die Rückenverlängerung wird gemeinsam mit der Kopfstütze montiert. Hierzu wird die Rückenverlängerung auf den Verbindungsstab der Kopfstütze geschoben und dann wie bei der Kopfstütze beschrieben an die Rückenlehne montiert. (Abb. 9)



Abb. 9

Montage des Therapietisches

Unterhalb der Armauflagen befinden sich die Aufnahmen (Abb. 10) für den Therapietisch. Schieben Sie den Therapietisch mit den Rohren gleichmäßig in die Aufnahmen, damit dieser nicht verkantet.



Abb. 10

Die vollständige Übersicht über unser umfangreiches Angebot an Zubehör für den Physio Punkt finden Sie unter dem Punkt **11.2 Typen und Zubehör** auf Seite 22.

11 Typen und Zubehör

11.1 Grundmodelle

- SP1-300-1 Sitzschale Physio Punkt, Größe 3
- SP1-400-1 Sitzschale Physio Punkt, Größe 4
- SP1-500-1 Sitzschale Physio Punkt, Größe 5

11.2 Zubehör / Optionen

- Z50-300-1 Polstereinsatz, sechsteilig, für Größe 3
- Z50-400-1 Polstereinsatz, sechsteilig, für Größe 4
- Z50-500-1 Polstereinsatz, sechsteilig, für Größe 5
- B01-373 Bezug rot, für Größe 3
- B01-374 Bezug blau, für Größe 3
- B01-473 Bezug rot, für Größe 4
- B01-474 Bezug blau, für Größe 4
- B01-673 Bezug rot, für Größe 5
- B01-674 Bezug blau, für Größe 5
- PAB-111-10 Kopfstütze klein
- PAB-111-11 Kopfstütze groß
- PAB-111-12 Kopfstütze lateral
- SP-013-A Armlehnen klein, Paar
- SP-013-B Armlehnen groß, Paar
- SP-013-C Armlehnen breit, angeformt, Paar
- Z12-200-1 Schulterbügel
- Z09-300-1 Rückenverlängerung gebogen, Größe 3 (nur in Verbindung mit Kopfstütze)
- Z09-400-1 Rückenverlängerung gebogen, Größe 4 (nur in Verbindung mit Kopfstütze)
- Z09-500-1 Rückenverlängerung gebogen, Größe 5 (nur in Verbindung mit Kopfstütze)
- SP-016-1 Holztisch
- SP-016-5 Holztisch, gepolstert
- UZ-035-0-3 Sicherheitsweste, Größe 0 rosé

UZ-035-0-2	Sicherheitsweste, Größe 0 blau
UZ-035-1-3	Sicherheitsweste, Größe 1 rosé
UZ-035-1-2	Sicherheitsweste, Größe 1 blau
UZ-035-2-3	Sicherheitsweste, Größe 2 rosé
UZ-035-2-2	Sicherheitsweste, Größe 2 blau
UZ-035-3-3	Sicherheitsweste, Größe 3 rosé
UZ-035-3-2	Sicherheitsweste, Größe 3 blau
UZ-035-4-3	Sicherheitsweste, Größe 4 rosé
UZ-035-4-2	Sicherheitsweste, Größe 4 blau
C4044	H-Gurt, gepolstert, mit Sicherheitsgurtschloss
C4045-1	H-Gurt, gepolstert, mit anatomischer Sitzhose
C4048	Brustgurt mit Kunststoffverschluss
C405101	Gurt mit Polster, 25 cm breit, 120 cm lang
C405102	Gurt mit Polster, 30 cm breit, 130 cm lang
C405103	Gurt mit Polster, 40 cm breit, 150 cm lang
UZ-026-1503	Parallelogrammfußschale klein schwarz
UZ-026-2503	Parallelogrammfußschale mittel schwarz
UZ-026-3503	Parallelogrammfußschale groß schwarz
UZ-028-9503	Haltestange Standard
SP-015-B	Abduktionskeil mit Halterung und Beschlag, schwarzer Kunstlederbezug

 **Die aktuellste Übersicht über unser umfangreiches Angebot an Zubehör für den Physio Punkt und viele weitere nützliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.ato-form.com.**

Bei speziellen Problemstellungen bzw. wenn es Ihnen scheint, dass für Ihren Bedarf benötigtes Zubehör nicht abgebildet oder beschrieben ist, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Vielleicht liegt die für Sie richtige Lösung schon bei uns bereit.

12 Technische Daten

Physio Punkt		Größe 3	Größe 4	Größe 5
Artikelnummer		SP1-300-1	SP1-400-1	SP1-500-1
Sitzbreite	cm	29,0	32,0	37,0
Sitztiefe	cm	35,0	37,0	42,0
Höhe der Rückenlehne	cm	52,0	58,0	63,0
Neigungsverstellung der Rückenlehne	Grad	-5° bis 36°	-5° bis 30°	-5° bis 25°
Produktgewicht	kg	8,7	9,7	10,9
Maximales Nutzergewicht	kg	60,0	70,0	80,0

Technische Änderungen vorbehalten!

Konstruktion

Die Sitzschale Physio Punkt ist aus Aluminium gefertigt, verstellbare Metallteile sind verchromt, Klemmhebel sind aus Kunststoff.

13 Reinigung und Desinfektion

Speisereste, Schmutz und Staub müssen stets entfernt werden. Bewegliche Teile funktionieren leichter, wenn Sie nach dem Reinigen einen Tropfen Öl auftragen.

Reinigung der Metallteile:

Die lackierten und verchromten Teile der Sitzschale sollten nur mit mildem, alkoholhaltigem handelsüblichen Reinigungsmittel und einem weichen Tuch abgewischt werden.

Reinigung der Imitat- und -Holzflächen:

Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch.

Reinigung der Kunststoffteile:

Die Kunststoffteile sollten nur mit mildem, alkoholhaltigem handelsüblichen Reinigungsmittel und einem weichen Tuch abgewischt werden.

Reinigung der Rollen/Räder und Gelenke:

Diese stets sauber halten; Staub, Haare und sonstigen sich ansammelnden Schmutz regelmäßig entfernen.

Reinigung Textilien und Kunstlederbezüge:

Diese reinigen Sie am besten mit einem milden Reinigungsmittel.

Bei Verwendung der Reinigungsmittel sind die Gebrauchsvorschriften des Herstellers zu befolgen.

Desinfektion:

Bei Notwendigkeit einer Desinfektion mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln, berücksichtigen Sie folgende Hinweise:

Die Hilfsperson muss geeignete Schutzkleidung tragen (z. B. Handschuhe), um Infektionen zu vermeiden.

Bei Verwendung der Desinfektionsmittel sind die Gebrauchsvorschriften der Hersteller zu befolgen.

Warnung!

Keine starken Reinigungsmittel verwenden, die ggf. die Oberfläche des Hilfsmittels angreifen.

Die Verwendung eines Hochdruckreinigers führt zum Wegfall der Gewährleistung.

Tragen Sie Vorsorge, dass die Polster- und Holzflächen sauber gehalten werden. Urin und Schweißabsonderungen können das Produkt beschädigen.

14 Wartung und Instandsetzung

Für die Wahrung der Gewährleistung und Sicherheit ist es erforderlich, dass die Sitzschale ab der Anschaffung regelmäßig einmal im Jahr gewartet wird.

Es wird empfohlen Servicevereinbarungen zu treffen. Der Hersteller stellt Ihrem Fachhändler gerne auf Anfrage die Wartungscheckliste zur Verfügung.

Falls Instandsetzungsarbeiten an Ihrem Physio Punkt erforderlich sein sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Spätestens nach 3 Jahren ist eine Überprüfung des Hilfsmittels beim Hersteller bzw. dessen Beauftragtem erforderlich.

Wartungs-Checkliste

Rahmen

- Metallteile; keine Anzeichen von Schäden oder Verschleiß, insbesondere an justierbaren Teilen
- Schweißnähte intakt
- Befestigungen, Schrauben, Muttern und Federn sicher
- Ersatz von Teilen bei Anzeichen von Verschleiß
- Keine Anzeichen von Abnutzung oder Schäden an den Sicherungskomponenten für den Pflegebedürftigen

Polsterauflagen

- Keine Anzeichen von Verschleiß

15 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Der Physio Punkt wird aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt und unterliegt in unserem Haus einer ständigen Qualitätskontrolle. Aufgrund dessen und der soliden Bauweise beträgt die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität und Anzahl der Wiedereinsätze, bis zu 5 Jahre.

Voraussetzung ist hierfür der normale, bestimmungsgemäße Gebrauch, gemäß den Vorgaben in dieser Gebrauchsanweisung.

Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleißteile.

Das Produkt Physio Punkt wurde so konzipiert, dass es nach Durchführung verschiedener Maßnahmen und der Freigabe für den Wiedereinsatz geeignet ist.

Folgende Maßnahmen müssen erfüllt sein:

- Gründliche Reinigung und Desinfektion mit den geeigneten Mitteln
- Austausch von Verschleißteilen
- Wartung nach Wartungscheckliste und Überprüfung durch den Hersteller oder autorisierten Händler
- Erstellen der Begleitpapiere und Freigabe für einen Wiedereinsatz

16 Störungen, Reparatur, Ersatzteile

Es dürfen nur Original-Ersatzteile und Zubehör verwendet werden. Bei Nichtbeachtung bzw. Reparaturen oder Änderungen am Physio Punkt oder dessen Bestandteilen durch nicht autorisierte Personen, erlischt jegliche Gewährleistung.

Jede Produkthaftung seitens des Herstellers oder dessen Vertreter (ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34, 63877 Sailauf) wird in diesen Fällen im Voraus ausgeschlossen.

Für Fragen zu Ersatzteilen und Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den ATO FORM-Service unter der Tel.-Nr.: 06093 944-0.

 **Ersatzteile und Zubehör dürfen während der Nutzung der Sitzschale durch den Nutzer nicht entfernt oder ausgewechselt werden!**

17 Aufbewahrung

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig an einem Ort auf, an dem Sie oder das Pflege- und Wartungspersonal Zugang haben.

Die aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.



Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf unserer Homepage unter www.ato-form.com oder unter diesem QR-Code.





In Sachen Umweltschutz:

Alle Verpackungsteile sind wieder verwendbar. Die Kartonage soll dem Wertstoff Altpapier zugeordnet werden. Wir verwenden deshalb als Füllstoff auch Papier. Eventuell verwendete Kunststofffolien der Verpackung sind aus PE, können somit schadstoffarm verbrannt oder recycelt werden.

Gesamtprogramm:

- Kopf- und Körperschutz
- Sitzhilfen
- Stehhilfen
- Gehhilfen / Gehtrainer
- Aufstehhilfen und Lifter
- Therapiehilfsmittel
- Hilfsmittel für Bad und WC
- Sonderbau

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Bei Fragen stehen wir Ihnen, wie auch unsere Außendienstmitarbeiter oder Ihr Fachhändler, gerne zur Verfügung.

Ihr ATO FORM Team



ATO FORM GmbH

Zur Lauterhecke 34, 63877 Sailauf
Tel. 06093 944-0, Fax 06093 944-444
E-Mail: info@ato-form.com

www.ato-form.com

Ihr Fachhändler