


Der Adapter wird zwischen der Pumpe und dem Turn All-Schlauchanschluss eingesetzt. (siehe Grafik)

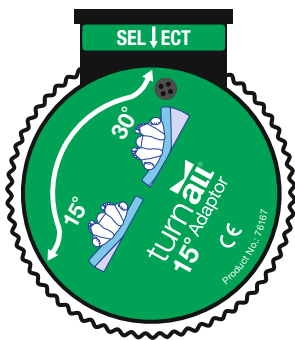

Wird der Adapter auf 30-Grad eingestellt (siehe Bild) hebt die Matratze auf einen 30°-Winkel für 30, 60 oder 90 Minuten an. Nach 30, 60 oder 90 Minuten wird der Patient auf die andere Seite positioniert. Die 5°-Gegendruck zum sicheren Positionieren sind durchgehend aktiviert.



Wird der Adapter auf 15-Grad eingestellt (siehe Bild) hebt die Matratze auf einen 15°-Winkel für 30, 60 oder 90 Minuten an. Nach 30, 60 oder 90 Minuten wird der Patient auf die andere Seite positioniert. Die 5°-Gegendruck sind bei der 15-Grad Positionierung nicht aktiviert.

