


Der neue Adapter wird zwischen der vorhandenen Pumpe und dem Turn All-Schlauchanschluss eingesetzt.

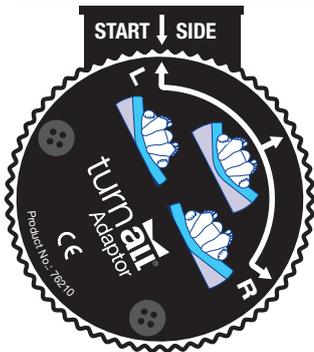

Die Mittelstellung des Drehknopfes hebt beide Seiten der Matratze in einen 30°-Winkel und verbleibt dort als statische Position.



Die linke Position des Drehknopfes hebt die linke Seite (siehe Skizze) der Matratze auf einen 30°-Winkel für 30, 60 oder 90 Minuten an und kehrt anschließend in die Rückenlage für 30, 60 oder 90 Minuten zurück, bevor die nächste Positionierung der linken Seite beginnt. Eine seitliche Stütze von 5° ist die ganze Zeit aktiviert.



\* Falls das System beim Start nicht hebt, beginnt es mit der Rückenlage. Um direkt mit einer 30°-Positionierung zu beginnen, schalten Sie die Pumpe für 5 Sekunden über den Ein-/Aussschalter aus und dann wieder ein.



Die rechte Position des Drehknopfes hebt die rechte Seite (siehe Skizze) der Matratze auf einen 30°-Winkel für 30, 60 oder 90 Minuten an und kehrt anschließend in die Rückenlage für 30, 60 oder 90 Minuten zurück, bevor die nächste Positionierung der rechten Seite beginnt. Eine seitliche Stütze von 5° ist die ganze Zeit aktiviert.



\* Falls das System beim Start nicht hebt, beginnt es mit der Rückenlage. Um direkt mit einer 30°-Positionierung zu beginnen, schalten Sie die Pumpe für 5 Sekunden über den Ein-/Aussschalter aus und dann wieder ein.